



Diversey™

Oxivir Sporicide

Detergent și dezinfectant pentru suprafețele dispozitivelor medicale non-invazive și suprafețe neporoase

Descriere

Diversey Oxivir Sporicide este un agent de curățare și dezinfectant gata de utilizat, într-un singur pas, eficient împotriva *Clostridioides difficile* și *Bacillus subtilis*. Bazat pe tehnologia brevetată a Diversey cu formulă pe bază de peroxid de hidrogen accelerat, Oxivir Sporicide poate fi utilizat pe suprafețe dure, neporoase, și dispozitive medicale non-invazive.

Proprietăți de bază

- Eficiente împotriva *C. difficile* în 5 minute
- Acțiune bactericidă și virucidă completă în doar 1 minut
- Profil pozitiv al siguranței pentru utilizator și suprafețe, în comparație cu alte sporicide
- Curățare eficientă
- Nu conține parfum
- Ingredientul activ se descompune în apă și oxigen – fără reziduuri de produs pe suprafețe
- Nu conține clor sau alcool

Avantaje

- Răspuns excelent în cazul unei epidemii de *C. difficile*
- Spectru larg al eficacității împotriva tuturor celorlalte clase de agenți patogeni, oferind cele mai înalte niveluri de protecție a pacienților
- Timpii scurți de contact păstrează suprafața umedă, asigurând astfel eficacitatea dezinfectării
- Nu necesită clătire
- Nu provoacă iritarea căilor respiratorii
- Potrivit pentru utilizare în zone cu grad ridicat de risc din domeniul medical, inclusiv unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală, saloanele pacienților și camerele de izolare
- Pulverizatorul cu spumă permite o aplicare eficientă

Instrucțiuni de utilizare

Curățare și dezinfectare prin pulverizare:

1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Aplicați pe suprafețe prin pulverizare pe laveta de curățare sau aplicați direct pe suprafață utilizând un pulverizator cu pistol.
3. După timpul de contact menționat pe etichetă, ștergeți până când se usucă sau lăsați să se usuze la aer.

Date tehnice

Aspect: Lichid limpede, incolor

Valoare pH (la utilizare): $2,7 \pm 0,3$

Densitate relativă (20 °C): 1,033

Termen de valabilitate: 720 zile

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.



CE 0044



AHP®



© A.I.S.E.



Oxivir Sporicide

Informații despre manipulare și depozitare în condiții siguranță

Informații complete referitoare la manipularea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com. Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Reacționează în contact cu substanțele oxidabile.

Compatibilitatea produsului

Important: A nu se amesteca cu alte produse. Nu folosiți pe suprafețe sensibile la apă sau acizi. În condițiile recomandate de utilizare, Oxivir Sporicide de la Diversey este adecvat utilizării pe cele mai multe materiale găsite în mod obișnuit.

Date microbiologice

Consultați tabelul EN de pe ultima pagină

Informații ecologice

Surfactanții folosiți în acest produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate în conformitate cu Regulamentul UE privind detergenții, CE 648/2004

Dimensiuni disponibile ambalaj

Oxivir Sporicide este disponibil în flacoane cu pulverizator de spumă, 6x0,75 litri

AHP® și Design and Oxivir® sunt mărci înregistrate Diversey, Inc.



Oxivir® Sporicide

		Condiții de murdărie
	Teste EN	Timp de contact
Acțiune bactericidă	EN 1276*	1 min.
	EN 13727	30 sec.
	EN 13697*	1 min.
Acțiune levuricidă	EN1650*	1 min.
	EN13624	1 min.
	EN 13697*	1 min.
Acțiune virucidă	EN 14476	1 min.
	(Adenovirus, Poliovirus, Norovirus Murin)	
Acțiune fungică	EN1650*	6 min.
	EN13624	6 min.
	EN 13697*	6 min.
Acțiune micobacterică	EN14348 Mycobacterium avium	5 min.
	EN14348 Mycobacterium terrae	10 min.
Acțiune sporicidă	EN 13704 (B. subtilis)*	15 min.
	EN17126 (C. difficile)	5 min.
* Teste realizate în condiții de murdărie în spații non-sanitare		